

SWIPER[®]


スワイパー インstrumentワイプ
～ 清拭用ポリウレタンフォーム～

- マイクロ器具
- バイポーラ鑷子
- ガイドワイヤー など



SWIPER とは

- 滅菌された器具や機器から、血液・造影剤・その他の汚染物質を除去するために設計されています
- 患者様への異物混入を抑えることを目的としています
特に、ガーゼなどの繊維片が血管内に残ると塞栓などのリスクを伴うことが報告されており、そのリスクを最小限にすることを目的とした製品です
参考文献：Syntervention 社ホームページ (<http://syntervention.com/references/>)
- 滅菌済で生体適合性があり、繊維質ではない医療デバイス用のワイパーです

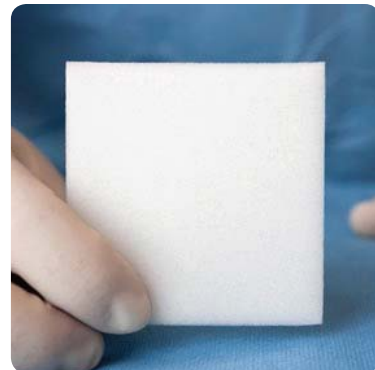

適用

- ・心臓カテーテル
- ・末梢血管インターベンション
- ・インターベンショナルラジオロジー (IVR)
- ・ニューロインターベンション
- ・血管外科
- ・一般外科
- ・眼科
- ・整形外科
- ・耳鼻咽喉科
- ・ロボット手術
- ・電気生理学
- ・歯科


特長

- ・高い吸収性 (自重の 20 倍)
- ・水分を含んでも形状を維持
- ・耐久性があり、ほつれない
- ・生体適合性あり
- ・ラテックスフリー
- ・フタル酸フリー
- ・ファイバーフリー
- ・低微粒子

対象器具

- ・マイクロ器具
- ・バイポーラ鑷子
- ・ガイドワイヤー
- ・カテーテル
- ・手袋
- ・インプラント
- ・内視鏡レンズ
- ・腹腔鏡レンズ

臨床現場では

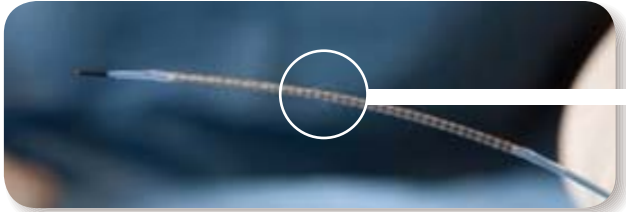

手袋を介してステントに付着した、コットンガーゼの繊維



ガイドワイヤーに付着した
コットンガーゼの繊維



ガイドワイヤーをつたって、からまって
しまったコットンガーゼの繊維

※ 製造元提供

Order Information

品番	品名	サイズ	入数
5001	スワイパー インstrumentワイプ	76 x 76 x 6	1 箱 (10 袋入), 1 枚入 / 1 袋
5002	スワイパー インstrumentワイプ	76 x 76 x 6	1 箱 (10 袋入), 2 枚入 / 1 袋

仕様

- ・ EOG 滅菌済み
- ・ ポリウレタン

注意事項

- ・ 人体への直接的な使用は不可
- ・ ガイドワイヤーなど表面コーティングされている製品への使用は、SWIPER にループを作って滑らせ、圧力が掛からないように使用する



販売名：スワイパー インストゥルメントワイブ
届出番号：13B1X00167000252



欧和通商株式会社

本社	TEL 03(5803)7172	FAX 03(5803)7185
東京営業所	TEL 03(3813)8201	FAX 03(3813)8204
大阪営業所	TEL 06(6304)9305	FAX 06(6304)9576
福岡営業所	TEL 092(526)3618	FAX 092(526)3148
札幌営業所	TEL 011(708)7725	FAX 011(708)7868

<http://www.ohwa-tsusho.com>

第1種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00167

取扱店

CA20071304